

Matières plastiques / Nettoyage et entretien

Assises et rembourrages en polyuréthane

Les sièges de douche NORMBAU avec une assise en polyuréthane ont une surface lisse facile à entretenir. Ils sont utilisés depuis de nombreuses années dans le domaine des soins, du bien-être et de la rééducation, dans les hôpitaux, cabinets médicaux, saunas, ainsi que dans l'industrie.

Le polyuréthane utilisé par NORMBAU répond aux exigences techniques et hygiéniques nécessaires dans ces domaines et présente également l'innocuité dermatologique et bactériologique requise.

Les salissures s'enlèvent aisément à l'aide d'un chiffon doux, éventuellement humide, ou à l'aide d'une éponge.

Dans le cas de salissures plus importantes, nous recommandons l'utilisation d'un produit de nettoyage courant tous usages, avec un PH compris entre 6 et 9.

Les dépôts de calcaire peuvent être enlevés à l'aide d'un produit anti-calcaire courant mais le produit doit impérativement être dilué dans les proportions indiquées par le fabricant et retiré après un temps d'exposition très court.

En règle générale, tous les produits de nettoyage contenant un acide, du benzène ou de l'alcool sont à éviter. Même un faible pourcentage d'acide (plus de 10%) peut attaquer la surface et altérer la couleur. Dans tous les cas, le mode d'emploi conseillé par le fabricant doit être respecté.

Les assises ou rembourrages en polyuréthane se nettoient à l'aide de produits d'entretien courants doux ou des désinfectants avec un faible pourcentage d'alcool.

Exemples :

- Microx (une combinaison de produit de nettoyage et désinfectant)
- Meltan (produit de nettoyage)
- Terralin et Meliseptol (Désinfectant)

Nous recommandons d'éviter des températures plus de 80 °C afin d'éviter toute altération du matériau.